

フィジオマグネット用 サイズゲージ 使用説明書


フィジオマグネット サイズゲージ(25,30,35,40,45)は、口腔内や模型上で適切な大きさのサイズを選択する際に使用します。

- 本品を正しくお使いいただくため、ご使用前にこの説明書を良くお読み下さい。
- 本説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管し、分からないときには再読してください。なお、使用説明書を紛失した場合は、販売元、発売元または製造元まで御連絡ください。
- 本品は、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士以外の方はご使用にならないで下さい。
- ゲージとリテンションの取り付け部は曲げないでください。
- 本品の滅菌はタグを必ず取り外して行ってください。
- 本品のご使用にあたっては、使用説明書に記載されている使用方法を厳守してください。

■仕様

直径(mm): ϕ 2.5, ϕ 3.0, ϕ 3.5, ϕ 4.0, ϕ 4.5

厚さ(mm): 2.1(キーパーとマグネットの厚さに相当)

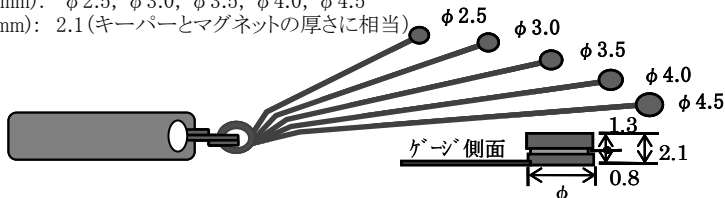

■特長

- ① フィジオマグネットの5種類のサイズを再現しています。
- ② サイズゲージはマグネットとキーパーをあわせた厚みで、マグネットとキーパーの各々の厚みが分かるようにラインを入れております。
- ③ 口腔内や模型上で支台歯に最適なサイズが一目でわかります。
- ④ ロッド部分は口腔内で使用しやすい長さになっております。

■使用方法

- ① 支台歯の大きさに最適な直径のサイズを選択します。
- ② 支台歯とキーパーとの間に十分な金属の厚みが確保できるか否かを確認します。
- ③ 対合歯との間の垂直距離が十分にあるかを確認します。

※ 根面板、義歯の製作についてはフィジオマグネットの添付文書を参考にしてください。

■包装

1組入り(5本組)

.....

販売: 株式会社 モリタ

東京都台東区上野2丁目11番15号

TEL(03)-3834-6161

大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号

TEL(06)-380-2525

製造: 株式会社ケディカケディカ

宮城県仙台市泉区明通3丁目20

TEL(022)-777-1351