


キーパーインサートツール

【禁忌・禁止】

- (1)本品は、使用目的以外に使用しないこと。
- (2)本品は、対応製品以外と組み合わせて使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

形状:

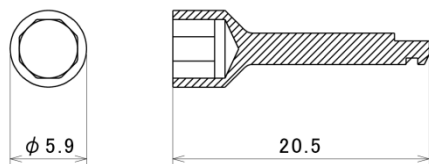

構造:

ハイパースリム キーパー TK に接続するためのソケット部と、本品を回転させるハンドルに装着するための接続部からなる。

材質:

ステンレス鋼(JIS G 4303, SUS630 相当)

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用アバットメントに歯科用精密磁性アタッチメントのインプラント用キーパーを螺合するために用いられる。

【使用方法等】

- (1)アバットメントの取り付け
インプラント本体に、通法によりアバットメントを取り付けます。
- (2)スクリューの取り付け
アバットメント頭頂部の雌ねじにキーパー固定用スクリューを取り付けます。
- (3)キーパーの取り付け
キーパーをキーパー固定用スクリューに取り付けます。
- (4)キーパーの固定
ハンドルに装着した本品を、キーパーに取付け、キーパーに指定されたトルクにてキーパーを締め付けます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1)キーパー固定用スクリューはサイズが小さいので、スクリューをアバットメントに取付ける際に口腔内に落とし、患者が誤飲しないような処置を採ってください。
- (2)スクリューをアバットメントに取付ける際は、アバットメント雌ネジにまっすぐに取り付けてください。曲がって取付けると、キーパーが正しい位置に取付けられず、スクリューの破折につながります。
- (3)本品によりキーパーを固定する場合、指定のトルクにて締め付けてください。指定トルクより小さいとキーパーが容易に緩み、大きいとスクリューが破折するおそれがあります。

【使用上の注意】

【使用注意】

- (1)本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- (2)本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【重要な基本的注意】

- (1)本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本品に触れないようにしてください。また、本品の使用により過敏症状を起した場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

本品は、歯科医の従事者以外が触れないように適切に保管してください。

【文献請求先】

株式会社ケディカ

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称】

製造販売及び主たる設計:

株式会社ケディカ

住所:

〒981-3206

宮城県仙台市泉区明通3丁目20番

電話番号:

022-777-1351(代)

受付時間: 9:00AM~5:00PM、

休日: 弊社カレンダーによる